

PASO 1:

- TOMA TU DISPOSITIVO



PASO 2:

- RETIRA LA TAPA



PASO 3:

- RETIRA EL LENTE Y OCULAR (LA PARTE NEGRA COMPLETA)



PASO 4:

- VISUALIZA QUE LA PARTE PLANA (VIDRIO) DEL TEST ESTE LIMPIA Y SECA



PASO 5:

- SACAR LA MUESTRA DE SALIVA DE LA BOCA (SOLO MOJAR EL DEDO)



PASO 6

- DEPOSITAR LA MUESTRA DE SALIVA (EVITA FORMACION DE BURBUJAS)



PASO 7


- VOLVER A COLOCAR EL LENTE OCULAR (LA PARTE NEGRA COMPLETA)



PASO 8

- CERRAR EL DISPOSITIVO Y ESPERAR (MIN 20 MIN) ESPERA LO SUFICIENTE

SI ES NECESARIO ESPERAR MAS PARA SU SECADO DEJALO MAS TIEMPO
(EJEMPLO : TOMA LA MUESTRA EN LA MAÑANA Y REVISALA A MEDIO DIA O EN LA NOCHE, O TOMALO EN LA NOCHE Y REVISAS AL OTRO DIA) ESO ASEGURARA LA INTERPRETACION. LIMPIA EL TEST ENTRE CADA MUESTRA.

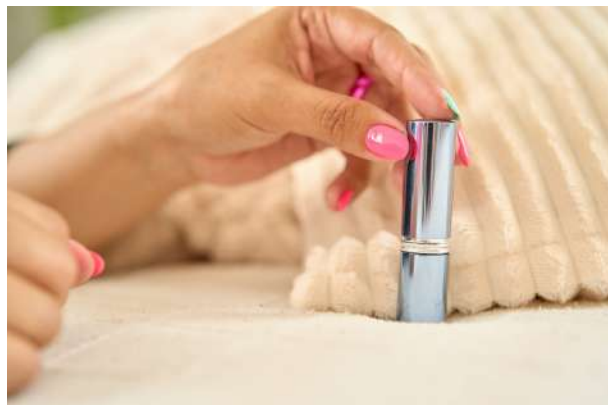

PASO 9:

- OBSERVAR POR EL LENTE EL RESULTADO, BUSCANDO EL MEJOR AUMENTO A TU OJO, ESTO SE LOGRA REGULANDO , GIRANDO LA PRIMERA PARTE DEL LENTE



PASO 10:

- INTERPRETACION



imagen 1: ventana no fértil

imagen 2: inicio ventana fértil

imagen 3: ventana fértil